

INJEKTION MIT SURECLICK®

EIN ÜBERBLICK ÜBER DIE VERWENDUNG
DES REPATHA® FERTIGPENS (SURECLICK®)




Diese Broschüre soll Ihnen einen Überblick und grundlegende Informationen zum SureClick® Fertigen geben und ersetzt nicht die Gebrauchsinformation. Bitte lesen Sie vor der Injektion die Ihrem verschriebenen Arzneimittel beiliegende Gebrauchsinformation durch. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Ihre Ärztin.

 **Repatha**®
(Evolocumab)

LERNEN SIE IHREN SURECLICK® FERTIGPEN KENNEN

Einführung in den Fertigpen


- Der SureClick® Fertigpen ist ein gebrauchsfertiger Fertigpen, der mit Ihrem Arzneimittel vorgefüllt ist.
- Bitte lesen Sie vor der Injektion die Gebrauchsinformation für detaillierte Anweisungen.

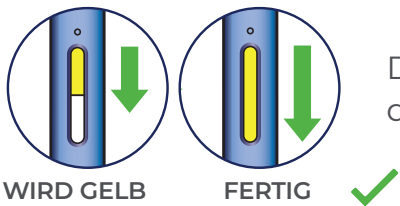

Das **FENSTER** wird während der Injektion **gelb**.

Stellen Sie sicher, dass die Flüssigkeit im Fenster klar und farblos bis leicht gelblich ist.


⚠ Den Fertigpen **NICHT** verwenden, wenn das Arzneimittel trüb oder verfärbt ist oder Flocken oder Partikel enthält.

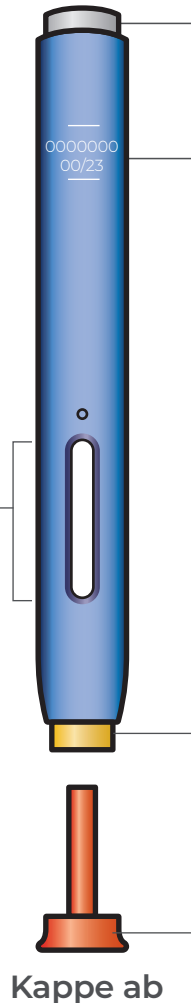

Der **STARTKNOPF** funktioniert nur, nachdem die Schutzvorrichtung entriegelt wurde.

VERFALLSDATUM Verwenden Sie den Fertigpen nicht nach dem auf dem Etikett angegebenen Verfallsdatum.

Die **SCHUTZVORRICHTUNG** entriegelt den Startknopf und deckt die Nadel ab, nachdem die Injektion abgeschlossen ist.

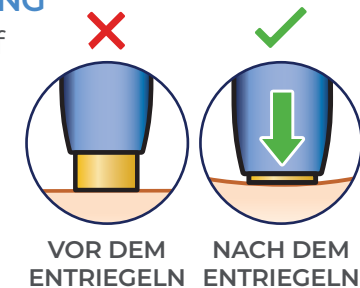

⚠ Berühren Sie die Schutzvorrichtung **NICHT** (enthält Nadel).

⚠ Nehmen Sie die Kappe **ERST DANN** ab, wenn Sie zur Injektion bereit sind. Führen Sie die Injektion innerhalb von **5 Minuten** nach dem Abnehmen der Kappe durch.


VORBEREITUNG | VORBEREITEN DES FERTIGPENS

Bereiten Sie den Fertigpen vor, indem Sie ihn Raumtemperatur erreichen lassen.



Nehmen Sie einen Fertigpen heraus, den Sie für die aktuelle Injektion benötigen.

- Legen Sie alles bereit, einschließlich eines Kanülenbehälters.


 Bewahren Sie den Fertigpen und alle Arzneimittel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.





Lassen Sie den Fertigpen mindestens 30 Minuten auf Raumtemperatur aufwärmen.




Verwenden Sie den Fertigpen innerhalb von 5 Minuten nach dem Entfernen der Kappe.

 Nehmen Sie die Kappe **ERST DANN** ab, wenn Sie zur Injektion bereit sind.

 Wenn Sie länger als 5 Minuten warten, kann das Arzneimittel austrocknen.


 Legen Sie das Arzneimittel nach dem Aufwärmen auf Zimmertemperatur **NICHT** mehr in den Kühlschrank.



 Entsorgen Sie Fertigpens, die nicht im Kühlschrank aufbewahrt wurden, nach 30 Tagen.




 Lassen Sie den Fertigpen **NICHT** im Auto liegen.

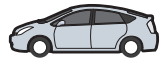

 Lassen Sie den Fertigpen **NICHT** in direktem Sonnenlicht liegen.




 Erwärmen oder erhitzen Sie den Fertigpen **NICHT**.

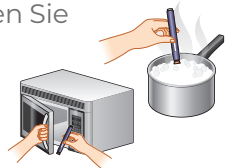

 Frieren Sie den Fertigpen **NICHT** ein und verwenden Sie ihn nicht in gefrorenem Zustand.

VORBEREITUNG | WÄHLEN SIE DIE INJEKTIONSSTELLE UND REINIGEN SIE SIE

- Legen Sie die Materialien zunächst an einem ruhigen, stillen und gut beleuchteten Ort bereit. Wählen Sie einen Ort, an dem Sie nicht gestört werden. Legen Sie die Materialien auf eine ebene Oberfläche.
- Wählen Sie eine Injektionsstelle aus.
- Mögliche Injektionsstellen sind der Oberschenkel, der Bauch oder die Außenseite des Oberarms.
- Reinigen Sie die Injektionsstelle mit einem Alkoholtupfer und lassen Sie die Haut von selbst trocknen.

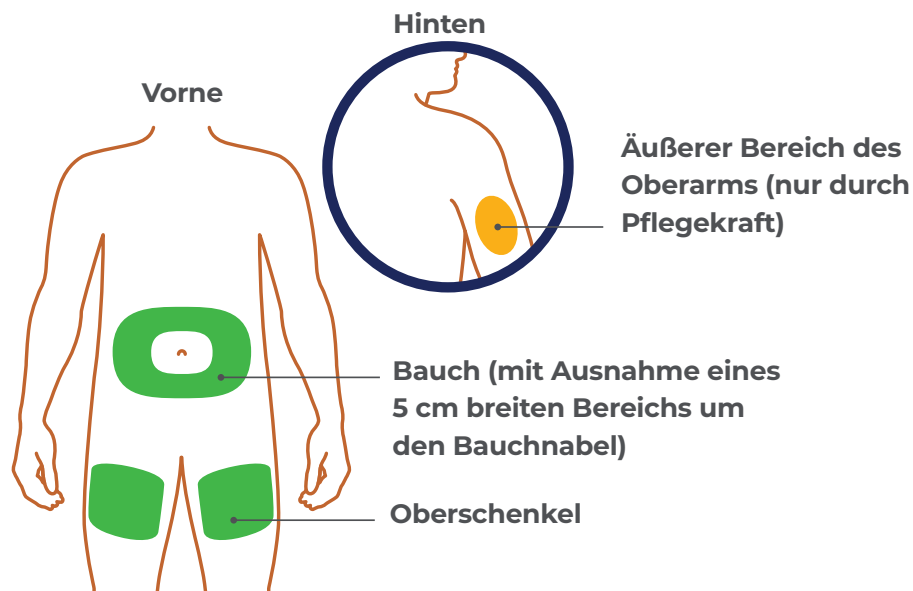

- Waschen Sie sich die Hände, bevor Sie die Injektionsstelle auswählen und reinigen.
- ⚠️ Berühren Sie diesen Bereich vor der Injektion **NICHT MEHR**.
- ⚠️ Setzen Sie die Injektion **NICHT** in Bereichen, in denen die Haut empfindlich, verletzt, gerötet oder hart ist.
- Vermeiden Sie die direkte Injektion in erhabene, dicke, rote oder schuppige Hautstellen oder Läsionen oder Bereiche mit Narben oder Dehnungstreifen.


Tipps!

- Drücken Sie die Haut zusammen oder dehnen Sie sie, um einen etwa 5 cm breiten, festen Bereich zu schaffen.
- Erwägen Sie eine Injektionsstelle mit einer dickeren Fettschicht.
- Manche Personen führen ein Tagebuch oder Protokoll, um ihre Injektionen zu protokollieren.

INJIZIEREN | NEHMEN SIE DIE KAPPE VOM FERTIGPEN

Ziehen Sie die Kappe erst dann gerade nach oben ab, wenn Sie zur Injektion bereit sind.

- Wenn Sie Fragen haben, holen Sie sich Hilfe, indem Sie in der Gebrauchsinformation nachschlagen oder sich auf cholesterin-neu-verstehen.de informieren, bevor Sie die Kappe abnehmen.

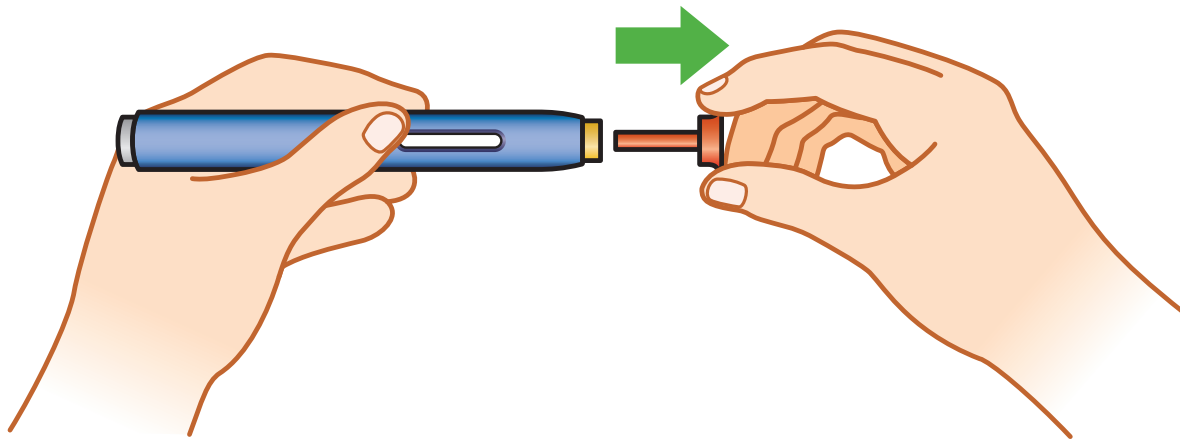


Verwenden Sie den Fertigpen innerhalb von 5 Minuten nach dem Entfernen der Kappe.

- ⚠ Drehen, biegen oder wackeln Sie **NICHT** an der Kappe.
- ⚠ Nehmen Sie die Kappe **ERST DANN** ab, wenn Sie zur Injektion bereit sind, um ein Austrocknen des Arzneimittels zu verhindern.
- ⚠ Setzen Sie die Kappe **NICHT** wieder auf den Fertigpen, nachdem Sie sie abgenommen haben.


INJIZIEREN | DRÜCKEN SIE DIE HAUT ZUSAMMEN ODER DEHNEN SIE SIE, UM EINEN 5 CM BREITEN, FESTEN BEREICH ZU SCHAFFEN.

DEHNEN (bei Verwendung des Oberschenkels)

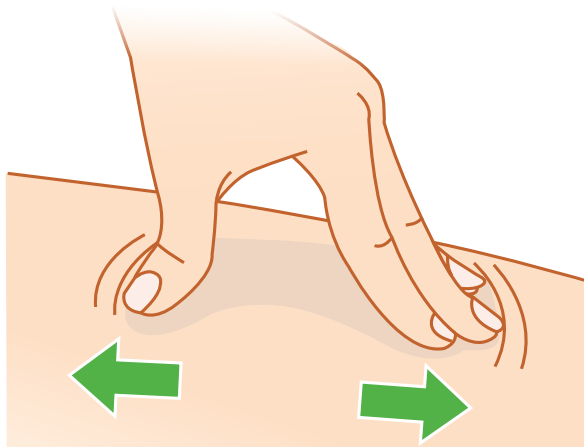

Straffen Sie die Haut, indem Sie Daumen und Finger in entgegengesetzte Richtungen bewegen, sodass ein etwa **5 cm breiter** Bereich entsteht.


ZUSAMMENDRÜCKEN (bei Verwendung von Bauch oder Oberarm)

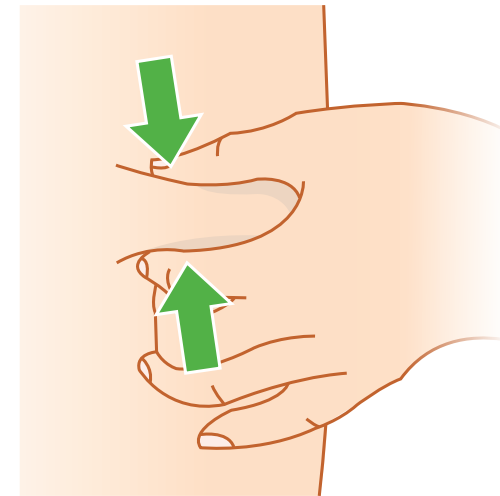


Drücken Sie die Haut fest zwischen Daumen und Fingern zusammen, sodass ein etwa **5 cm breiter** Bereich entsteht.

 Es ist wichtig, die Haut während der gesamten Injektion gedehnt oder zusammengedrückt zu halten.


INJIZIEREN | PLATZIEREN SIE DEN FERTIGPEN IM 90-GRAD-WINKEL AUF DER HAUT

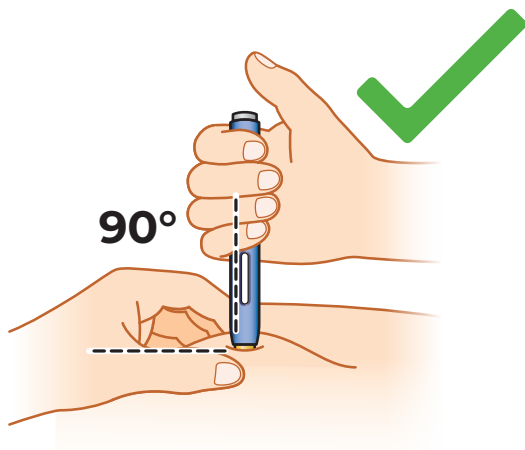

Platzieren Sie den Fertipen im 90-Grad-Winkel **gerade nach unten** auf der Haut.

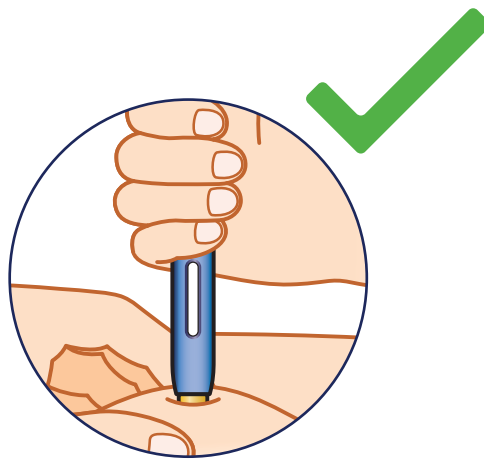

Stellen Sie sicher, dass Sie das gesamte Arzneimittelfenster sehen können und dass Ihre Finger das Fenster nicht verdecken.

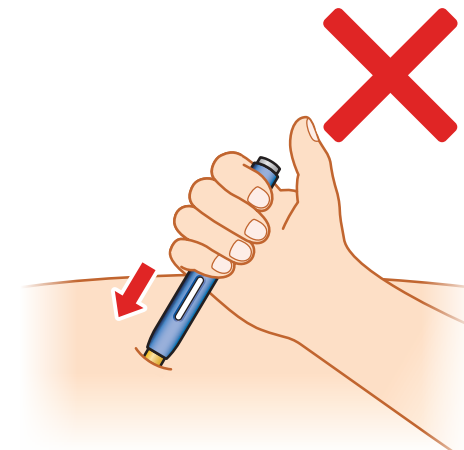


⚠ Setzen Sie den Fertipen **NICHT** schräg auf die Haut auf. Möglicherweise ist kein vollständiger Kontakt mit der Haut möglich, was dazu führen kann, dass der Fertipen nicht richtig funktioniert.

⚠ Wechseln Sie die Position **NICHT MEHR**, nachdem mit der Injektion begonnen wurde.

INJIZIEREN | WICHTIGE SCHRITTE ZUR VERWENDUNG DES SURECLICK® FERTIGPENS

1

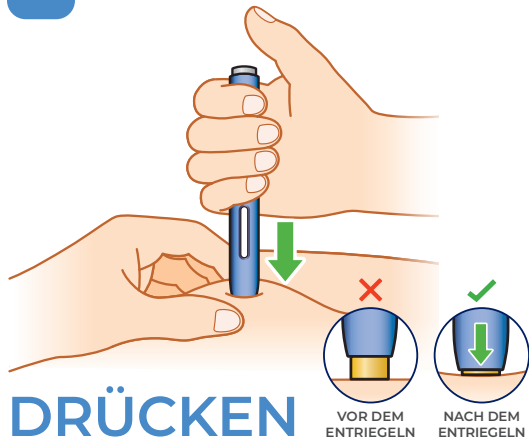


DRÜCKEN

Drücken Sie den Fertigpen fest auf die Haut, bis die **GELBE** Schutzvorrichtung sich nicht mehr bewegt.

Dadurch wird der graue Startknopf entriegelt.

2

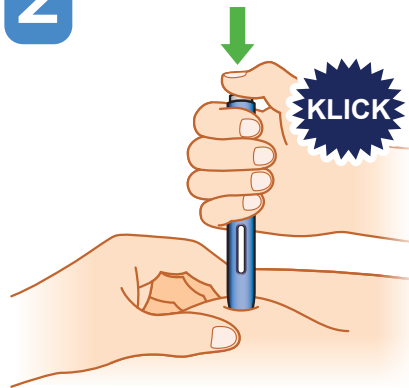

DRÜCKEN

Sie den Startknopf; Sie hören ein **KLICKEN**. **HALTEN** Sie den Fertigpen weiter nach unten gedrückt.

3



GEHEN SIE SICHER,

dass das Fenster vollständig **GELB** ist. Es ist in Ordnung, den Daumen zu heben. Der Vorgang dauert etwa 15 Sekunden.

Dann sind Sie fertig!

⚠️ **ACHTEN SIE DARAUF, DIESE SCHRITTE DER REIHENFOLGE NACH AUSZUFÜHREN:**


DRÜCKEN Sie **zunächst** den gesamten Fertigpen herunter, um die Schutzvorrichtung zu aktivieren und den Startknopf zu entriegeln.

DRÜCKEN Sie **als nächstes** den Startknopf.

⚠️ **DENKEN SIE DARAN:** Sie **MÜSSEN** den Fertigpen durch festen Druck auf die Haut entriegeln **UND DABEI** den Startknopf drücken, um die Injektion durchzuführen.

INJIZIEREN | DRÜCKEN SIE DEN FERTIGPEN FEST AUF DIE HAUT, BIS SICH DIE GELBE SCHUTZVORRICHTUNG NICHT MEHR BEWEGT.

Um den grauen Startknopf zu entriegeln, DRÜCKEN Sie den Fertigpen fest auf die Haut, bis er sich nicht weiter drücken lässt.

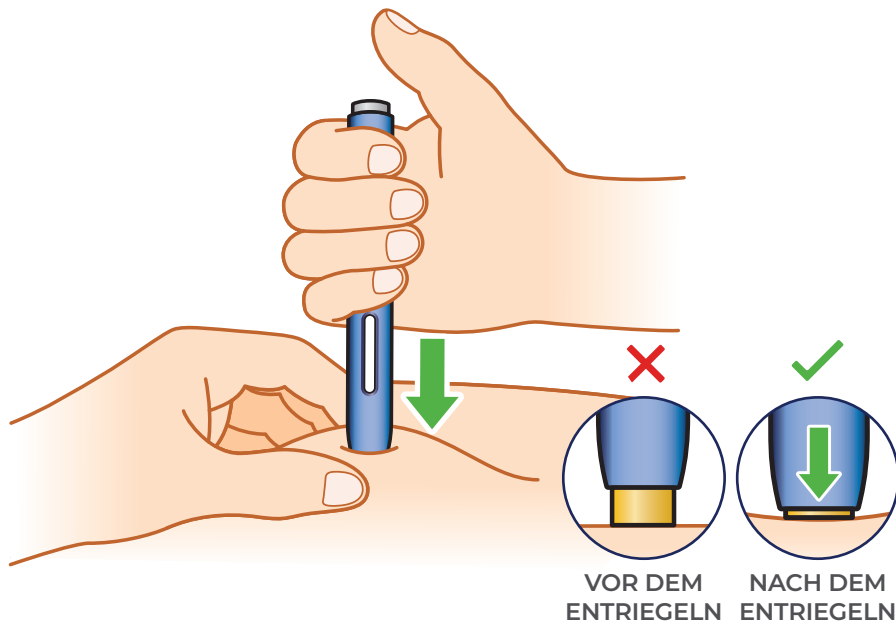


DRÜCKEN Sie den Fertigpen fest auf die Haut, bis sich die **gelbe** Schutzvorrichtung nicht mehr bewegt.

- **DRÜCKEN SIE WEITER. NICHT HEBEN.**
- Der Startknopf funktioniert erst, nachdem die **Schutzvorrichtung** ganz hineingeschoben wurde.

⚠ DENKEN SIE DARAN: Sie **MÜSSEN** den Fertigpen durch festen Druck auf die Haut entriegeln **UND DABEI** den Startknopf drücken, um die Injektion durchzuführen.

INJIZIEREN | DRÜCKEN SIE DEN STARTKNOPF, UM MIT DER INJEKTION ZU BEGINNEN

DRÜCKEN Sie anschließend den Startknopf, um die Arzneimittelzufuhr zu starten.

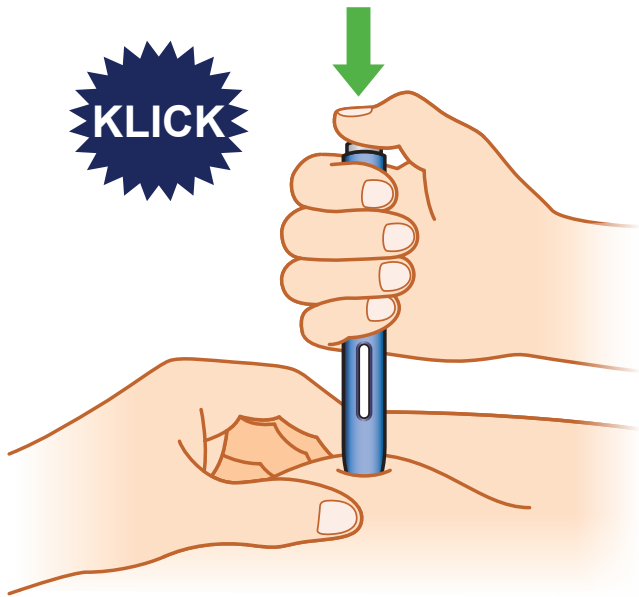

DRÜCKEN Sie auf den Startknopf, bis Sie ein Klicken hören.


- **HALTEN** Sie den Fertigpen während der gesamten Injektion mit dem gleichen Druck gedrückt.
- Der **STARTKNOPF** funktioniert nur, nachdem die Schutzvorrichtung entriegelt wurde.

⚠ Wenn Sie nach dem Drücken des Startknopfs kein Klicken hören und das Fenster immer noch klar ist, stellen Sie sicher, dass die Schutzvorrichtung zuerst ganz nach unten gedrückt wird. Versuchen Sie dann, den Knopf erneut zu drücken.

⚠ Für eine erfolgreiche Injektion müssen diese Schritte in der angegebenen Reihenfolge durchgeführt werden.

INJIZIEREN | ACHTEN SIE DARAUF, DASS DAS ARZNEIMITTELFENSTER **GELB** WIRD

Gehen Sie zuletzt sicher, dass das Arzneimittelfenster **GELB** wird und damit den erfolgreichen Abschluss der Injektion anzeigt.

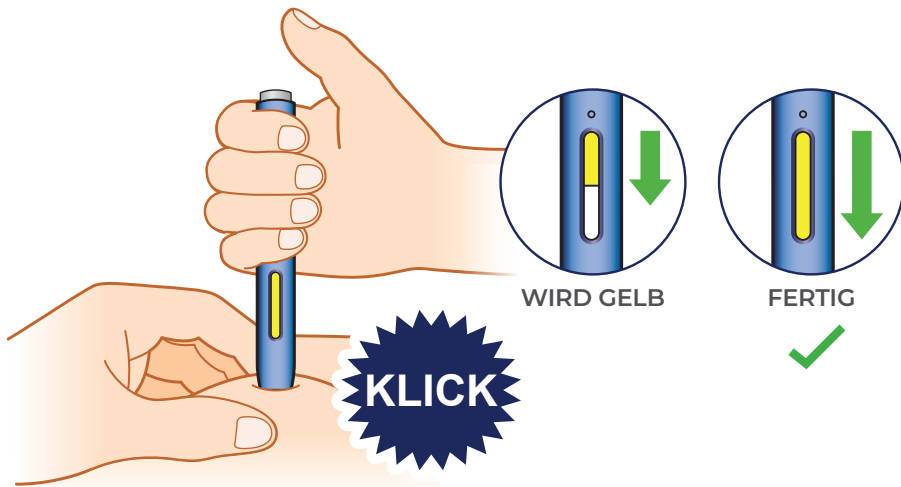

ACHTEN SIE DARAUF, dass das Fenster komplett **gelb** ist.

- Halten Sie den Fertigen weiterhin auf die Haut gedrückt, bis das Arzneimittelfenster komplett **gelb** wird, um sicherzustellen, dass das gesamte Arzneimittel injiziert wurde.
- Es ist in Ordnung, den Daumen zu heben.
- Die Injektion kann ca. **15 Sekunden** dauern.
- Ist das Fenster komplett **gelb**, sind Sie **FERTIG!**

★ **DANKE**, dass Sie das Injektionsverfahren durchgelesen haben.

Üben Sie die Schritte **DRÜCKEN** und **AUF DAS GELBE FENSTER ACHTEN** weiter, um sich an das Verfahren zu gewöhnen. Machen Sie sich diese einfachen Schritte zur Routine und wenden Sie sich bei Fragen oder Bedenken unbedingt an Ihren Arzt oder Ärztin.

UNTERSTÜTZUNG FÜR PATIENTEN ZUM SURECLICK® FERTIGPEN IST VERFÜGBAR


Sollten Sie zu irgendeinem Zeitpunkt Fragen haben, ist der Support nur ein paar Klicks entfernt.

Gebrauchsinformation



Die Gebrauchsinformation
finden Sie unter
**[cholesterin-neu-verstehen.
de/services/mediathek/
broschueren](https://cholesterin-neu-verstehen.de/services/mediathek/broschueren)**.

Injektionsvideo

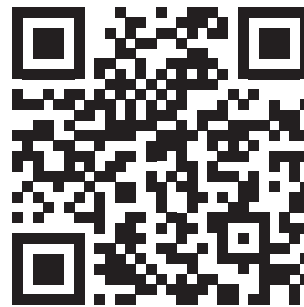

Halten Sie die Smartphone-
Kamera über den QR-Code

Website



Auf unserer Patient:innenwebsite
finden Sie umfangreiche
Hintergrundinformationen zum
Thema erhöhtes Cholesterin.
Bitte benutzen Sie diesen Link:
cholesterin-neu-verstehen.de.

Wichtige Sicherheitsinformationen

Verwenden Sie Repatha® nicht, wenn Sie allergisch gegen Evolocumab oder einen der Inhaltsstoffe von Repatha® sind.

Bevor Sie mit der Anwendung von Repatha® beginnen, informieren Sie Ihren Arzt über alle Ihre Erkrankungen, auch wenn Sie allergisch auf Gummi oder Latex reagieren, schwanger sind oder eine Schwangerschaft planen oder stillen oder stillen möchten. Die Nadelschutzkappen der vorgefüllten Einzeldosis-Spritzen und die Innenseiten der Nadelschutzkappen der vorgefüllten SureClick® Fertipens zur Einzeldosis enthalten trockenen Naturkautschuk.

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker über alle verschreibungspflichtigen und rezeptfreien Arzneimittel, Vitamine oder pflanzlichen Nahrungsergänzungsmittel, die Sie einnehmen.

Welche Nebenwirkungen kann Repatha® haben?

Repatha® kann schwerwiegende Nebenwirkungen, einschließlich schwerer allergischer Reaktionen, verursachen. Beenden Sie die Einnahme von Repatha® und wenden Sie sich umgehend an Ihren Arzt oder suchen Sie die Notaufnahme auf, wenn bei Ihnen eines dieser Symptome auftritt: Atem- oder Schluckbeschwerden, Nesselsucht, Ausschlag oder Juckreiz, Schwellung von Gesicht, Lippen, Zunge, Rachen oder Armen.

Zu den häufigsten Nebenwirkungen von Repatha® zählen: Schnupfen, Halsschmerzen, Erkältungssymptome, Grippe oder grippeähnliche Symptome, Rückenschmerzen, hoher Blutzuckerspiegel (Diabetes) sowie Rötung, Schmerzen oder Blutergüsse an der Injektionsstelle.

Informieren Sie Ihren Arzt, wenn bei Ihnen Nebenwirkungen auftreten, die Sie beeinträchtigen oder nicht verschwinden.

Die Liste der möglichen Nebenwirkungen von Repatha® ist nicht erschöpfend. Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker nach weiteren Informationen. Rufen Sie Ihren Arzt an, um medizinischen Rat zu Nebenwirkungen einzuholen.

Bitte lesen Sie die Gebrauchsinformation, die Ihrem Arzneimittel beiliegt.



© 2025 Amgen Inc.
Alle Rechte vorbehalten. Nicht zur Reproduktion. 05/25 DEU-145-0325-80019

