

Wichtige Informationen

Der Patientenpass soll dazu dienen, Medikationsfehler – vor allem eine Unterdosierung des Arzneimittels – zu vermeiden.

- ❖ Eine Arzneimittelunterdosierung kann auftreten, wenn sich der On-Body-Injektor von Ihrer Haut löst, undicht ist oder andere Fehlfunktionen aufweist.
- ❖ Wenn dies vorkommt, besteht für Sie das erhöhte Risiko einer schwerwiegenden Infektion.

Für weitere Informationen:

- ❖ Lesen Sie die Packungsbeilage, die dem On-Body-Injektor beiliegt.
- ❖ Besuchen Sie folgende Internetseite:
<https://fachkreise.amgen.de/Service/Arzneimittelinformationen/index.html>

Die folgenden Aktivitäten können die Funktionsfähigkeit des On-Body-Injektors beeinträchtigen:

- ❖ **Klopfen Sie nicht** gegen den On-Body-Injektor und ziehen Sie nicht an ihm!
- ❖ **Wenden Sie keine** Lotionen, Cremes, Öle oder Reinigungsmittel in der Nähe des On-Body-Injektors an!
- ❖ **Liegen Sie nicht** auf dem On-Body-Injektor und üben Sie keinen Druck auf ihn aus, während Sie ihn tragen!
- ❖ **Setzen Sie** den On-Body-Injektor weder CT, MRT, Röntgen, Ultraschall, Bestrahlung oder Überdruckkammern aus!
- ❖ **Tragen Sie** weite Kleidung und seien Sie vorsichtig beim Kleidungswechsel!
- ❖ **Halten Sie** den On-Body-Injektor mindestens 10 cm fern von elektrischen Geräten (wie z. B. Mobiltelefonen oder Mikrowellengeräten)!

Bitte lesen Sie diesen Pass durch und tragen Sie ihn bei sich.

Das medizinische Fachpersonal wird die folgenden Informationen eintragen.

Anbringen des On-Body-Injektors auf Ihrer Haut:

Datum *Zeit* *vor-/nachmittags*

Geschätzter Start Ihrer Injektion:

Datum *Zeit* *vor-/nachmittags*

Chargenbezeichnung des On-Body-Injektors:

KONTAKTINFORMATIONEN FÜR DEN NOTFALL

Name und Telefonnummer des medizinischen Fachpersonals:

Nachname, Vorname

Telefonnummer


Kontaktinformationen für Notfälle außerhalb der Geschäftszeiten:

Wie der On-Body-Injektor überwacht wird

- ❖ Während der ersten 27 Stunden, in denen Sie den On-Body-Injektor tragen, werden Sie eine langsam blinkende, grüne Statusanzeige sehen.
- ❖ Zwei Minuten vor Beginn der Injektion werden Sie eine Reihe von Signaltönen hören.
- ❖ Sobald die Injektion beginnt, werden Sie eine schnell blinkende, grüne Statusanzeige sehen.
- ❖ Die Injektion wird 45 Minuten dauern.
- ❖ Am Ende der Injektion werden Sie einen langen Signalton hören und die Statusanzeige wird dauerhaft grün leuchten.
- ❖ Jetzt können Sie den On-Body-Injektor langsam entfernen. Überprüfen Sie, ob er leer ist.

- **Kontaktieren Sie umgehend das medizinische Fachpersonal, wenn Sie Probleme mit dem On-Body-Injektor bzw. Symptome einer Infektion wie z. B. Fieber, Schüttelfrost oder Schwitzen haben!**
- **Versuchen Sie weder den On-Body-Injektor zu befestigen, wenn er sich gelockert hat, noch ihn erneut anzubringen, wenn er sich gelöst hat!**

Kontaktieren Sie umgehend das medizinische Fachpersonal, wenn eine der folgenden Situationen eintritt – Sie haben möglicherweise nicht Ihre vollständige Dosis erhalten:


- Die Statusanzeige blinkt rot.
 Rot blinkende Statusanzeige
Füllstandanzeige

- Die Klebefolie (der Teil, der Ihre Haut berührt) ist merklich durchnässt und/oder es sind Tropfen darauf zu sehen.



- Die Klebefolie löst sich von der Haut, bevor die Injektion abgeschlossen ist.
 Klebefolie löst sich von der Haut

- Wenn nach der 45-minütigen Injektionszeit die Markierungslinie der Füllstandanzeige nicht bei 0% ist.

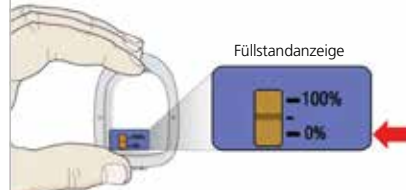

VERSUCHEN SIE UNTER KEINEN UMSTÄNDEN den On-Body-Injektor zu befestigen, wenn er sich gelockert hat, oder ihn erneut anzubringen, wenn er sich gelöst hat.

Neulasta®
(Pegfilgrastim)



Patientenpass für den On-Body-Injektor

- ❖ **Bitte öffnen Sie diesen Pass und lesen Sie alle Seiten.**
- ❖ **Tragen Sie ihn bei sich.**
- ❖ Dieser Pass ist verpflichtender Teil der Zulassung und enthält wichtige Sicherheitsinformationen zur Behandlung mit dem On-Body-Injektor für Pegfilgrastim.
- ❖ Zeigen Sie diesen Pass dem medizinischen Fachpersonal, wenn Sie umgehend medizinische Hilfe bezüglich des On-Body-Injektors benötigen!